

点滴タイマー操作手順書…通常設定

2006年4月7日
株式会社アイテックス

※簡易設定モードもあります。(輸液セット、流量のみでの設定)

①モードの切り替え		②設定の開始		③予定量			④点滴時間		
MODEボタンを押して点滴タイマー表示にします		真ん中のボタンを長押し(3秒)するとピーという音が鳴ります		予定量が点滅して入力の待機状態になります		向かって右ボタンを押すと数値が増えます		向かって左ボタンを押すと数値が減ります	
MODEボタンを押して点滴タイマー表示にします		真ん中のボタンを長押し(3秒)するとピーという音が鳴ります		予定量が点滅して入力の待機状態になります		向かって右ボタンを押すと数値が増えます		向かって左ボタンを押すと数値が減ります	
				分間触れずに放置すると、待機状態が解除されます		左右のボタンを長押しすると数値が早送りされます 設定範囲外の数値を入力するとエラーとなり「E」が表示され、設定モードが解除されません。数値を増減させて、範囲に戻してください			
⑤輸液セット		⑥流量		⑦お知らせモード		⑧設定の完了		⑨カウントの開始	
輸液セットが点滅して入力の待機状態になります		④の点滴時間と同様に数値を合わせて決定します		自動計算されています。真ん中のボタンを押して決定します		LEDマークとブザーマークが点滅して入力待機状態になり		左右どちらかのボタンを押して操作して設定します	
輸液セットが点滅して入力の待機状態になります		④の点滴時間と同様に数値を合わせて決定します		自動計算されています。真ん中のボタンを押して決定します		LEDマークとブザーマークが点滅して入力待機状態になり		左右どちらかのボタンを押して操作して設定します	
						<ul style="list-style-type: none"> LEDとブザー LED(光)のみ ブザーのみ 			
				数値を変更した場合は予定量と点滴時間が「-」になります。予定量に戻り設定しなおしてください		決定前に設定の変更がある場合は、真ん中のボタンを押して項目を送って設定してください			
				数値を変更した場合は予定量と点滴時間が「-」になります。予定量に戻り設定しなおしてください		決定前に設定の変更がある場合は、真ん中のボタンを押して項目を送って設定してください			